


V-Check SARS-CoV-2 Antigen „Lollipop“ Test

1. Allgemeines


- die verpackten Tests kühl, frostfrei und trocken lagern
- die Tests nur bei Raumtemperatur benutzen
- die Testkits können in separaten Müllbeuteln im Hausmüll entsorgt werden

2. Durchführung

- Verpackung entfernen
- einmal räuspern, um Schleim im Hals zu lösen
- den runden Griff in die Hand nehmen und mit dem Schwamm für **90 Sekunden** den inneren Mund und die Zunge an verschiedenen Stellen aktiv abtupfen
 - darauf achten, dass der Schwamm sich mit reichlich Speichel anreichert
 - ist der Tupfer ausreichend gesättigt, färbt sich der Indikator blau

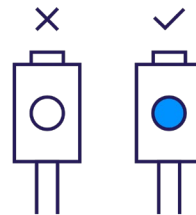

- den "Lollipop" danach aus dem Mund nehmen und diesen mit der Spitze voran in einem Winkel von 45° in die Testkassette einführen
 - den Griff langsam nach unten drücken, bis dieser mit einem „Klick“ in der Testkassette einrastet

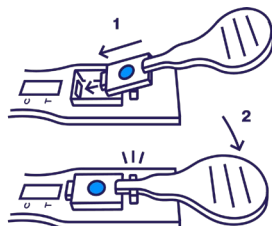


- ab jetzt 15 Minuten warten



- bereits nach kurzer Zeit ist zu erkennen, wie sich die Testfarbe über das Anzeigedisplay bewegt

3. Ergebnis

- nach 15 Minuten das Testergebnis ablesen und interpretieren

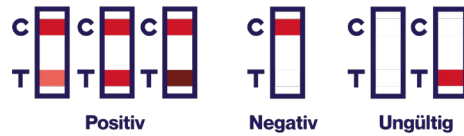

- die Testkits können in separaten Müllbeuteln im Hausmüll entsorgt werden

4. Weiterführender Link

<https://www.youtube.com/watch?v=Y8HMcW0XD8w>

